

Sichere und wirksame Behandlungen



Akne - Vor und nach 1 Behandlung

Genehmigung von Dr. Shan



Akne - Vor und nach 1 Behandlung

Genehmigung von Dr. S. Martin



Akne - Vor und nach 3 Behandlungen

Genehmigung von Prof Drosner



Akne - Vor und nach 5 Behandlungen

Genehmigung von Dr. Scardigli



Akne - Vor und nach 3 Behandlungen

Genehmigung von Dr. Scardigli



Scannen und Behandlung ansehen

Akne

KLINISCH GETESTET
SICHER UND WIRKSAM

Ellipse®

Ellipse A/S

Agern Allé, 11 DK-2970
Hørsholm, Denmark
+45 45 76 88 08

www.ellipse.com

[ellipselasers.wordpress.com](http://www.ellipselasers.wordpress.com)
[facebook.com/Ellipse.Denmark](https://www.facebook.com/Ellipse.Denmark)
[youtube.com/ellipsedenmark](https://www.youtube.com/ellipsedenmark)



Dr. Daniela Küng – Alle Kassen
Fachärztin für Gynäkologie u. Geburtshilfe
6973 Höchst, Franz-Reiter-Straße 8
Telefon +43 5578 73322 Fax DW 11
E-Mail gyn@praxis-rheindelta.at

Ellipse ist ein Hersteller von Licht-basierten Lösungen für medizinische und kosmetische Behandlungen. Ellipse hat die Anerkennung von Ärzten und Kosmetikerinnen für die Qualität der Produkte und Dienstleistungen weltweit gewonnen. © Ellipse a/s. Alle Rechte vorbehalten.

1PLA8458-A01



Erweiterte IPL & Laser
Haut - Lösungen


Ellipse®

An einem gewissen Punkt in unserem Leben bekommen wir alle Akne

Wie Akne entsteht

Unsere Körper produziert ein Hormon namens Androgen. Dieses stimuliert unsere Talgdrüsen, eine ölige Substanz namens Talg zu produzieren. Eine Überproduktion von Talg kann Poren blockieren, so dass diese überfüllt werden. Hautbakterien (*P. Aknen*) ernähren sich von Talg und bauen ihn auch ab. Die Mischung aus Haar-Protein, Talg und Fettsäuren, die von den Bakterien dabei erzeugt wird, reizt die Wände des Haarfollikels und verursacht Entzündungen.

AKNE ZYKLUS

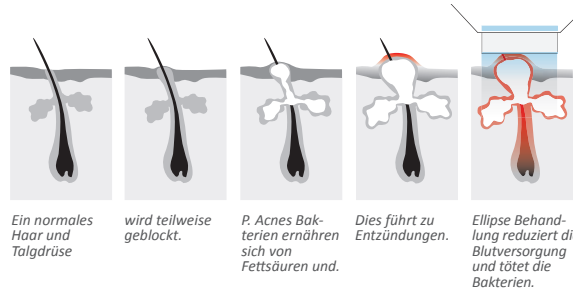

Wie funktioniert die Ellipse Behandlung?

Die Ellipse Behandlung reduziert die Blutversorgung der Talgdrüse, und verlangsamt/reduziert somit die Talgproduktion. Hierzu werden kurze, sichere Impulse eines intensiv gepulsten Lichts (die sogenannte 2PL-Technologie von Ellipse, oftmals aber auch nicht ganz korrekt als ein Laser bezeichnet) auf die Haut abgegeben. Das System filtert das Licht um zu

gewährleisten, dass die verwendeten Wellenlängen vom Hämoglobin in den feinen Blutgefäßen die die Talgdrüsen versorgen, absorbiert werden.

Wie lange dauert eine Behandlung mit Ellipse?

Es erfordert ca. 60 Lichtblitze um das gesamte Gesicht zu behandeln. Ihr Aufenthalt in der Klinik dauert etwa 20-30 Minuten, einschließlich Beratung und Vorbereitung. Ein typischer Verlauf der Therapie umfasst vier Behandlungen in dreiwöchigem Abstand.

Kann ich behandelt werden?

Die besten Ergebnisse werden auf entzündlicher Akne erreicht – rote, schmerzhaft, erhöhte Pickel. Es ist wichtig, dass Ihre Haut nicht gebräunt ist.

Tut es weh?

Eine Anästhesie ist nicht erforderlich. Viele Patienten beschreiben die Behandlung als praktisch schmerzfrei, wie ein Schnellen von einem Gummiband auf die Haut, gefolgt von einem Wärmeempfinden das für einige Zeit anhält, wie z.B. nach einem Sonnenbad.

Benötige ich spezielle Vorsichtsmaßnahmen vor und nach der Behandlung?

Das verwendete Licht ist vollkommen ungefährliches, fast dem Tageslichtspektrum entsprechendes Licht, so dass keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind. Ellipse-Akne-Behandlung ist eine Kombinationstherapie. In den meisten Fällen werden Sie in der Klinik eine Tube Adapalen Creme oder Kontaktgel (in den meisten Ländern bekannt als Differin[®]) erhalten, die sie zusätzlich im Aknebereich anwenden. Diese Substanzen verringern die durch Akne verursachte Entzündung und reduzieren

Hautverdickungen die den Talgabfluss behindern. Mehr hierzu werden Sie von Ihrem behandelnden Arzt erfahren. In der Regel ist keine besondere Pflege nach der Behandlung notwendig. Menschen mit empfindlicher Haut können von einer kalten Kompresse (kein Eis) unmittelbar nach der Behandlung oder von einer vom Arzt verschriebenen Salbe profitieren.

Was kann ich erwarten?

Sie können eventuell nach der Behandlung eine allgemeine Rötung im Gesicht bemerken. Wenn Sie sonnengeschädigte Haut haben, können einige der pigmentierten Flecken zunächst dunkler erscheinen und schließlich nach einigen Tagen verschwinden. Da die Bakterien nur schwer vollständig zu beseitigen sind, wird Ihnen Ihr Arzt wahrscheinlich empfehlen, die Adapalen-Creme/das Kontaktgel für einige Monate nach Ende der Ellipse Behandlung weiterhin zu benutzen. Sollten sie in der Zukunft einen weiteren Akne-Ausbruch erleiden, kann die Ellipse Behandlung wiederholt werden. Obwohl die Ergebnisse von Person zu Person variieren, können Sie im Vergleich zu einer alleinigen medikamentösen Therapie, ein besseres Abklingen der Akne und eine schnellere Aufklärung der Haut erwarten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, welche Ergebnisse Sie erwarten können.

Wie kann ich sicher sein, dass die Ellipse sicher und wirksam ist?

Veröffentlichte, Klinische Studien von führenden Ärzten dokumentieren die Sicherheit und Effektivität der Ellipse-Behandlung von sonnengeschädigter Haut. Diese wissenschaftlichen Dokumente können Sie gerne auf der Ellipse-Website, unter www.ellipse.com einsehen.